

ROOM 7



FÜR HOHE SEHANFORDERUNGEN AM ARBEITSPLATZ

Das Freeform Nah-Komfortglas mit 7 wählbaren Degressionen



optiswiss[®]
original since 1937

Für entspanntes Sehen am Arbeitsplatz

Dank der modernen **Freeform-Technologie** kann Optiswiss bei der Fertigung seiner Nah-Komfortgläser **Room 7** besser auf die Sehanforderungen der Kunden eingehen. Das **Room 7** bietet **7 wählbare Degressionen** für stufenlose Übergänge, die somit ein harmonisches und komfortables Sehen ermöglichen. Ob im beruflichen oder privaten Umfeld, Sie bestimmen den optimalen Leseabstand (zwischen 33 cm und 400 cm) für Ihren Kunden.

Positionierung der Nah-Komfortgläser

STANDARD ★★

ACCESS

- Typ A (Stärkenred. 0,75)
- Typ B (Stärkenred. 1,25)
- Erweiterter Nahbereich

Minimale Anpasshöhe [mm]: Fassungsmitte
Materialien: ORGA 150

QUALITY ★★★★★

ROOM 7

Freeform-Technologie

- 7 Degressionen zur Auswahl

Nähe	★★★★★
Zwischenbereich	★★★★★
Verträglichkeit	★★★★★
Kontrast	★★★★★
Minimale Anpasshöhe [mm]: 18	
Mindestabstand vom Zentrierkreuz zum oberen Fassungsrand [mm]: 12	
Materialien: ORGA 150 / 160 / 167	

PREMIUM ★★★★★

NEARIS HD

Swiss HD-Technologie

- **Individuelle Parameter:**
Pupillendistanz
Hornhautscheitelabstand
Fassungsscheibenwinkel
Vorneigung
- **3 Designkategorien zur Auswahl:**
OFFICE, DESK und **READER**

Nähe	★★★★★
Zwischenbereich	★★★★★
Verträglichkeit	★★★★★
Kontrast	★★★★★
Objektabstand Nähe [cm]: 38	
Minimale Anpasshöhe [mm]: 18	
Mindestabstand vom Zentrierkreuz zum oberen Fassungsrand [mm]: 12	
Materialien: ORGA 150 / 160 / 167 / 174	

Bestimmung der Degression

Beispiel: Bürokauffrau 52 Jahre

- Ferne Plan, **ADD 2,25** / Sehanforderung: scharfe Sicht von ca. **40 - 200 cm** im Nah- und Zwischenbereich.
- Bestellwerte: **Room 7 +2,25** dpt, Degression **1,75** dpt.

Verwenden Sie zur Demonstration der unterschiedlichen Sehbereiche resp. Degressionen die Messbrille.

Leseabstand von 33 - 400 cm		Addition des Kunden										
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Degression	0,75	400	200	133	100	80	66	57	50	44	40	36
	1,00		400	200	133	100	80	66	57	50	44	40
	1,25			400	200	133	100	80	66	57	50	44
	1,50				400	200	133	100	80	66	57	50
	1,75					400	200	133	100	80	66	57
	2,00						400	200	133	100	80	66
2,25							400	200	133	100	80	

Anpassempfehlung

- Die Anpassung erfolgt nach Fernzentrierung.
- Gemessen wird in Nullblickrichtung bei natürlicher Kopf- und Körperhaltung.
- Minimale Anpasshöhe: 18 mm / Mindestabstand vom Zentrierkreuz zum oberen Fassungsrand: 12 mm.
- **Room 7** ist nicht Kraftfahrzeugtauglich.